

Технический паспорт на медицинское изделие

«Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и искусственной вентиляции легких, с принадлежностями.

VA-4512-03 Взрослый анестезиологический дыхательный контур, 180 см»

**Производитель: "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд." / «Great Group Medical Co., Ltd.»
Адрес: № 168, Xingong 2nd Rd., Tianzhong Township, Changhua County 520, Taiwan**

Содержание

1. Назначение
2. Технические характеристики
3. Меры предосторожности
4. Условия хранения
5. Упаковка
6. Гарантия изготовителя
7. Документ, подтверждающий регистрацию МИ

1. Назначение:

Доставка газовой смеси пациенту при проведении ингаляционной анестезии.

2. Технические характеристики:

Материал трубок - этиленвинилацетат.

Материал адаптеров - полипропилен.

Материал дыхательного мешка - латекс.

Профиль трубок - трубка конфигурируемая.

Трубка инспираторной линии дыхательного контура: внутренний диаметр 22 мм, длина в расправленном состоянии 180 см., прямой адаптер 22F для соединения с коннектором дыхательного модуля наркозного аппарата, соединение трубки с прямым адаптером неразъемное.

Трубка экспираторной линии дыхательного контура: внутренний диаметр 22 мм, длина в расправленном состоянии 180 см., прямой адаптер 22F для соединения с коннектором дыхательного модуля наркозного аппарата, соединение трубки с прямым адаптером неразъемное.

Дополнительная трубка: внутренний диаметр 22 мм, длина в расправленном состоянии 120 см., прямой адаптер 22F с двух сторон, соединение трубки с прямыми адаптерами неразъемное.

Y-образный адаптер 22M/15F-22M. Соединение Y-образного адаптера с трубками линии вдоха и линии выдоха неразъемное.

Угловой адаптер (22M/15F-15M) с портом «Luer-lock» с винтовой герметичной заглушкой.

Мешок дыхательный, объем 2 литра.

3. Меры предосторожности

- Не используйте изделие, если упаковка открыта или повреждена;
- Не используйте, если изделие повреждено;
- Не используйте изделие по истечению срока годности;
- Не используйте изделие не по назначению;
- Не используйте изделие повторно;
- Не используйте изделие, если внутри них присутствует постороннее вещество

После окончания процедуры утилизируйте медицинское изделие в соответствии с

СанПиН 2.1.3684-21.

4. Условия хранения и транспортировки

Температура хранения: от -25 до +55°C

Относительная влажность: 10-90%

Воздух не должен содержать агрессивных сред и опасных примесей. При транспортировке следует избегать воздействия на изделия избыточного давления, дождя и снега.

5. Упаковка

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке. В транспортной упаковке вложение - 50 штук.

6. Гарантия изготовителя

Гарантийный срок хранения изделия – 3 года с даты изготовления (при условии соблюдения условий хранения).

7. Документ, подтверждающий регистрацию МИ

Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12928 от 13.01.2020 года на медицинское изделие: «Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и искусственной вентиляции легких, с принадлежностями».

Производитель:

Great Group Medical Co., Ltd / "Грейт Групп Медикал Ко., Лтд."

Адрес: № 168, Xingong 2nd Rd., Tianzhong Township, Changhua County 520, Taiwan