

ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия «VN- 3110 Фильтр
тепловлагообменный дыхательный взрослый»

Порядок использования:

- Вскрыть упаковку (предварительно проверив упаковку на целостность).
- Установить фильтр между коннекторами эндотрахеальной трубки и дыхательного контура, соблюдая совместимость соединителей.
- Документировать дату и время установки фильтра.
- При видимом обильном загрязнении поверхности фильтрующего элемента мокротой, обтурации фильтра осуществить его замену.
- Своевременно осуществлять замену вирусно-бактериального тепловлагообменного фильтра по истечении максимально допустимого периода использования.

Предостережения:

- Вскрывать упаковку непосредственно перед использованием фильтра.
- Не допускается повторное использование фильтра у другого пациента.
- Не допускается превышение максимально допустимого периода использования (24 часа).

Утилизация:

Утилизация использованных фильтров проводится в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель

"Грейт Груп Медикал Ко., Лтд." / «Great Group Medical Co., Ltd.»