

Инструкция по использованию медицинского изделия

«Одежда медицинская одноразовая из нетканого материала: Бахилы»

Бахилы предназначены для защиты от распространения грязи и переноса инфекций. Бахилы применяются для защиты в различных отраслях и сферах, где требуется соблюдение норм гигиены: пищевое производство, общественное питание, домашние цели, в быту, хозяйственные нужды, промышленность, лабораторные исследования, косметология и медицина.

Порядок (алгоритм) использования по назначению (применения)

1. Вскройте упаковку;
2. Выньте бахилы из упаковки;
3. Расправьте бахилы;
4. Наденьте на обувь (бахилы надевайте с носка, затем расправьте по всей ширине и закрепите на пяточной части обуви);

Заменять бахилы следует по необходимости, в зависимости от износа и повреждений бахил.

Меры предосторожности

- Не используйте поврежденное изделие;
- Не используйте изделие, если упаковка открыта или повреждена;
- Не используйте изделие по истечению срока годности;
- Не используйте изделие не по назначению;
- Не используйте изделие повторно;

Условия хранения и транспортировки

Хранение бахил производится в упаковке предприятия изготовителя в сухом прохладном месте.

Срок годности

Гарантийный срок хранения бахил – 6 лет с даты изготовления.

Документ, подтверждающий регистрацию МИ

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10740 от 29.09.2011 года на медицинское изделие: «Одежда медицинская одноразовая из нетканого и полимерного материалов: 1.

Халат. 2. Комбинезон. 3. Фартук. 4. Маска. 5. Бахилы. 6. Шапочка. 7. Нарукавники. 8. Брюки.».

Производитель:

«Хубэй Сяньмэн Хелс Протекшн Коммодити» / «Hubei Xianmeng Health Protection Commodity Co., LTD»

Адрес: 433000 Industrial 1st road, Chenchang town, Xiantao, Hubei province, P.R. China