

Инструкция по использованию

«Зеркало гинекологическое одноразовое»

1. Введение

Зеркало гинекологическое одноразовое – предназначено для раскрытия или расширения влагалища и обнажения шейки матки при проведении диагностики и операций, а также для проведения профилактических осмотров и различных лечебных процедур у гинеколога в гинекологическом кабинете, на гинекологическом кресле.

2. Описание медицинского изделия

Зеркало гинекологическое одноразовое изготовлено из прозрачного атравматичного, апиrogenного, полимерного материала – полистирола. Зеркало гинекологическое стерилизовано оксидом этилена (ЕО). Зеркала не вызывают раздражения, исключает инфицирование слизистой оболочки влагалища.

3. Порядок (алгоритм) использования по назначению (применения)

1. Перед процедурой проведите гигиеническую обработку рук;
2. Используйте перчатки во время процедуры;
3. Осмотр в зеркалах проводится при положении женщины лежа на спине с разведенными и согнутыми в тазобедренных и коленных суставах ногами, удобно проводить осмотр на гинекологическом кресле;
4. Выберите наименьшее зеркало, позволяющее произвести полноценный осмотр влагалища и шейки матки;
5. Подготовьте зеркало (Проверьте срок годности, герметичность упаковки);
6. Извлеките зеркало гинекологическое из упаковки;
7. Одной рукой раздвиньте половую щель, второй рукой захватите зеркало гинекологическое;
8. Введите сомкнутое зеркало косо по отношению к половой щели;
9. Продвиньте сомкнутое зеркало до половины;
10. Раскройте зеркало, чтобы влагалищная часть шейки матки оказалась между створками;
11. Зафиксируйте зеркало при помощи фиксатора нужную степень расширения влагалища;
12. Влагалищная часть шейки матки осматривается после введения и фиксации фиксатора зеркала, извлечение зеркала необходимо проводить в раскрытом виде, так как при этом удобно осматривать спадающие стенки влагалища.

4. Меры предосторожности

- Не используйте изделие, если упаковка открыта или повреждена;
- Не используйте изделие, если зеркало гинекологическое повреждено;
- Не используйте изделие по истечению срока годности;
- Не используйте изделие не по назначению;
- Не используйте изделие повторно;
- Не используйте изделие, если внутри них присутствует постороннее вещество

После окончания процедуры, утилизируйте медицинское изделие, в соответствии с **СанПин 2.1.7.2790-10**.

Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного пациента. Повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых изделий содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств материала и нарушение стерильности, вызванное подобным повторным использованием, может привести к заболеванию, травме или смерти пациента.

5. Условия хранения

Хранение зеркал гинекологических производится в упаковке предприятия изготовителя в сухом прохладном месте. Избегать значительных колебаний температуры во время хранения.

6. Упаковка

Зеркала гинекологические поставляются в индивидуальной упаковке. В транспортной упаковке вложение - 100 штук.

7. Гарантия изготовителя

Гарантийный срок хранения зеркала гинекологического одноразового – 5 лет с даты изготовления (при условии соблюдения условий хранения).

8. Документ, подтверждающий регистрацию МИ

Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/09653 от 27.04.2011 года на медицинское изделие: «Зеркало гинекологическое одноразовое».

Производитель:

«Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd»

Адрес: 39 Shenlinan Rd., Jinxian Town, 331700 Nanchang, China