

## **Инструкция по использованию медицинского изделия**

«Одежда медицинская одноразовая из нетканого материала: Фартук»

Одноразовые фартуки обеспечивают защиту персонала от инфекций, которые передаются через крови и другие биологические материалы во время проведения перевязок и операций, связанных с большой кровопотерей. Фартуки используются во время проведения разнообразных процедур в лечебно-профилактических, оздоровительных, косметологических учреждениях, салонах красоты, а также лабораторных исследований. Широкое применение объясняется тем, что они являются надежным средством защиты не только от крови, но и от щелочи, кислоты и других жидкостей.

### **Порядок (алгоритм) использования по назначению (применения)**

1. Вскройте упаковку;
2. Выньте фартук из упаковки;
3. Наденьте на шею;
4. Расправьте фартук;
5. Закрепите завязки на спине;
6. Утилизируйте после использования.

### **Меры предосторожности**

- Не используйте поврежденное изделие;
- Не используйте изделие, если упаковка открыта или повреждена;
- Не используйте изделие по истечению срока годности;
- Не используйте изделие не по назначению;
- Не используйте изделие повторно;

### **Условия хранения и транспортировки**

Хранение фартука производится в упаковке предприятия изготовителя в сухом прохладном месте.

### **Срок годности**

Не ограничен

**Документ, подтверждающий регистрацию МИ**

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10740 от 29.09.2011 года на медицинское изделие: «Одежда медицинская одноразовая из нетканого и полимерного материалов: 1. Халат. 2. Комбинезон. 3. Фартук. 4. Маска. 5. Бахилы. 6. Шапочка. 7. Наручники. 8. Брюки.».

**Производитель:**

**«Хубэй Сяньмэн Хелс Протекшн Коммодити» / «Hubei Xianmeng Health Protection Commodity Co., LTD»**

**Адрес:** 433000 Industrial 1st road, Chenchang town, Xiantao, Hubei province, P.R. China