

## Инструкция по использованию медицинского изделия

### «Одежда медицинская одноразовая из нетканого материала: Маска»

Маски предназначены для того, чтобы устранить или уменьшить выделение возбудителя из респираторного тракта, и предотвратить инфицирование окружающих. Маски могут применяться для предотвращения попадания биологических жидкостей пациента на кожу, слизистые ротовой полости и носа при проведении различных медицинских манипуляций и оперативных вмешательств. Маски широко используются в лечебно-профилактических учреждениях.

#### Порядок (алгоритм) использования по назначению (применения)

1. Тщательно вымойте руки с мылом или используйте антисептический гель;



2. Расположите маску так, чтобы металлическая вставка оказалась сверху;



3. Зафиксируйте её на переносице и наденьте ушные петли;



4. Специальные складки на маске необходимо развернуть, придав маске более функциональную форму для плотного прилегания к лицу. Убедитесь, что маска закрывает не только нос и рот, но и подбородок;



5. Использованную маску, необходимо снять за ушные петли, не дотрагиваясь до ткани;



**В медицинских организациях использованные медицинские маски подлежат обеззараживанию и удалению, как отходы класса Б или В.**

**В домашних условиях использованные маски собирают в отдельный пакет и утилизируют вместе с бытовым мусором.**

### **Правила использования медицинских масок**

- Медицинскую маску используют однократно.
- При использовании маски необходимо избегать прикосновений к ней руками.
- Прикоснувшись к маске, необходимо вымыть руки или обработать кожным антисептиком.
- Если маска стала влажной ее следует заменить на чистую и сухую. Менять маски не реже чем через 2-3 часа использования.
- В случае попадания на маску крови или другой биологической жидкости нужно заменить маску на другую.
- Использованные маски подлежат обеззараживанию, как отходы класса Б или В.

### **Меры предосторожности**

- Не используйте поврежденное изделие;
- Не используйте изделие по истечению срока годности;
- Не используйте изделие не по назначению;
- Не используйте изделие повторно;

### **Условия хранения и транспортировки**

Хранение масок производится в упаковке предприятия изготовителя в сухом прохладном месте.

### **Гарантия изготовителя**

Гарантийный срок хранения масок – 6 лет с даты изготовления.

### **Документ, подтверждающий регистрацию МИ**

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10740 от 29.09.2011 года на медицинское изделие: «Одежда медицинская одноразовая из нетканого и полимерного материалов: 1. Халат. 2. Комбинезон. 3. Фартук. 4. Маска. 5. Бахилы. 6. Шапочка. 7. Наручники. 8. Брюки.»

### **Производитель:**

**«Хубэй Сяньмэн Хелс Протекшн Коммодити» / «Hubei Xianmeng Health Protection Commodity Co., LTD»**

**Адрес:** 433000 Industrial 1st road, Chenchang town, Xiantao, Hubei province, P.R. China