

## **Инструкция по использованию медицинского изделия**

Одежда медицинская одноразовая из нетканого материала: Халат

Халат медицинский одноразовый обеспечивает необходимый уровень защиты пользователя и помогает соблюдать санитарно-эпидемиологические/гигиенические требования.

### **Порядок (алгоритм) использования по назначению (применения)**

1. Вскройте упаковку;
2. Выньте халат из упаковки;
3. Кисти обеих рук поместите в проемы рукавов;
4. Убедитесь, что края манжет находятся у основания кистей;
5. Медсестра должна подтянуть халат на плечи, прикасаясь только к внутренней поверхности халата;
6. Зафиксировать горловину с помощью завязки;
7. Зафиксировать фиксатор пояса.



**В медицинских организациях использованные халаты подлежат обеззараживанию и удалению, как отходы класса Б или В.**

### **Меры предосторожности**

- Не используйте поврежденное изделие;
- Не используйте изделие, если упаковка открыта или повреждена;
- Не используйте изделие по истечению срока годности;
- Не используйте изделие не по назначению;
- Не используйте изделие повторно;

### **Условия хранения и транспортировки**

Хранение халата производится в упаковке предприятия изготовителя в сухом прохладном месте.

### **Гарантия изготовителя**

Гарантийный срок хранения халата– 6 лет с даты изготовления.

### **Документ, подтверждающий регистрацию МИ**

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10740 от 29.09.2011 года на медицинское изделие: «Одежда медицинская одноразовая из нетканого и полимерного материалов: 1. Халат. 2. Комбинезон. 3. Фартук. 4. Маска. 5. Бахилы. 6. Шапочка. 7. Наручники. 8. Брюки.».

### **Производитель:**

**«Хубэй Сяньмэн Хелс Протекшн Коммодити» / «Hubei Xianmeng Health Protection Commodity Co., LTD»**

**Адрес:** 433000 Industrial 1st road, Chenchang town, Xiantao, Hubei province, P.R. China