

Технический паспорт на медицинское изделие
«Изделия для взятия проб крови, с принадлежностями.
Игла двусторонняя»

Производитель: «Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd», 39 Shenlinan Rd., Jinxian Town, 331700 Nanchang, China, Китай

Введение

Двусторонние иглы применяются совместно с держателями и вакуумными пробирками при проведении процедуры взятия венозной крови.

Технические характеристики

Материал иглы - нержавеющая сталь. Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая, закрытая резиновым кожухом, для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. Силиконизированное покрытие иглы. Кончик иглы имеет трехгранную атравматичную заточку острия (каждая грань шлифуется ультразвуком). Двусторонняя игла обеспечивает закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой. Полная внутренняя стерильность иглы указана на упаковке.

Таблица 1 – Технические характеристики

Размер по шкале Гейдж (G)	Длина иглы, мм	Диаметр, мм
20 G	38	0,9
21G	38	0,8
21G	25	0,8
22G	38	0,7
23G	38	0,6

Метод стерилизации: оксид этилена (EO).

Транспортировка и хранение:

Условия хранения: 10°C-30°C. Относительная влажность не должна составлять не более 80%. При транспортировке изделия, не допускайте его падения, во избежание повреждения или загрязнения.

Меры предосторожности

- После открытия иглы, соблюдайте все необходимые меры предосторожности.
- Не используйте изделие с поврежденной упаковкой и этикеткой.
- Не используйте изделие с истекшим сроком годности
- Не используйте изделие с поврежденной поверхностью

- Во время проведения процедуры взятия и анализа крови, медицинский работник обязан использовать одноразовые перчатки во избежание заражения в случае пролития крови.

Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного пациента. Повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых изделий содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств материала и нарушение стерильности, вызванное подобным повторным использованием, может привести к заболеванию, травме или смерти пациента.

Упаковка

-100 штук в групповой упаковке/ 5000 штук в транспортной упаковке.

Гарантия производителя

Гарантийный срок хранения двусторонних игл - 5 лет с даты изготовления (с соблюдением условий хранения).

Производитель

«Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd», 39 Shenlinan Rd., Jinxian Town, 331700 Nanchang, China, Китай