


Инструкция по использованию медицинского изделия
«Тупферы с транспортными средами и без транспортных сред»

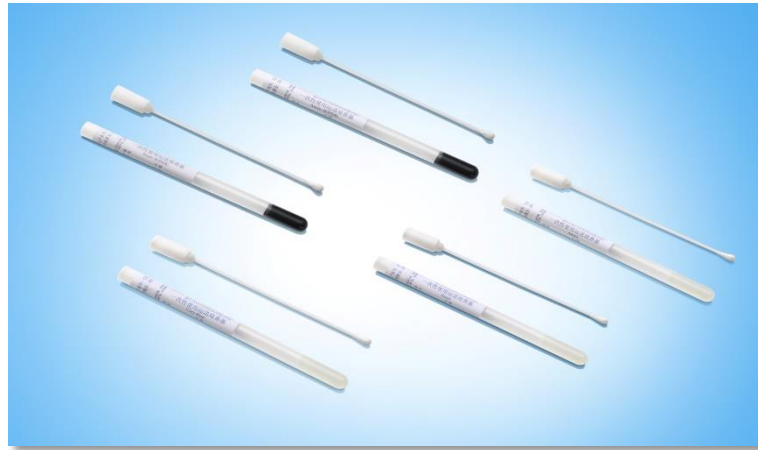

Тупферы с транспортными средами и без транспортных сред используются для взятия, хранения и транспортировки биологического материала.

Показания к применению

Изделие рекомендуется использовать для взятия и транспортировки клинического материала.

Описание изделия

- Тупферы с транспортными средами и без транспортных сред, состоит из пробирки с крышкой, зонда с наконечником;
- Пробирка изготовлена из ударопрочного полипропилена (13x150 мм);
- Крышка изготовлена из полиэтилена высокого давления;
- Зонд изготовлен из полистирола. Наконечник зонда изготовлен из вискозы (искусственный материал);
- Используется три вида транспортных сред для безопасного и гарантированного отбора образцов и надежной транспортировки: Amies, Amies с углем, Cary-Blair.
- Тупфер поставляется стерильным. Метод стерилизации: радиационный (R).

Порядок (алгоритм) использования по назначению (применения).

1. Выберите подходящий тупфер;
2. Проверьте целостность упаковки и срок годности медицинского изделия;
3. Перед предстоящей процедурой, продезинфицируйте руки и наденьте перчатки;
4. Аккуратно откройте упаковку;
5. Извлеките аппликатор и пробирку из индивидуальной упаковки;

6. Отберите пробу у пациента стерильным аппликатором; откройте крышку пробирки (край этикетки скреплен с крышкой – этикетка служит контролем первого вскрытия пробирки);
7. Вставьте аппликатор в пробирку, убедившись, что наконечник находится в среде, закройте крышку пробирки;
8. На этикетке пробирки укажите данные пациента;
9. Готовые образцы действительны в течение 72 часов.

Меры предосторожности

1. Не используйте изделие, если упаковка или пробирка повреждена;
2. Не сгибайте, приводит к неисправности изделия;
3. Не используйте пробирки по истечении срока годности;
4. После отбора проб, готовые образцы действительны в течение 72 часов;
5. Наконечник, после отбора проб, не должен контактировать с человеческим телом;
6. Строго соблюдать температурный режим хранения;
7. Не допускать замораживания;
8. Не используйте использованное медицинское изделие.

После окончания процедуры, утилизируйте медицинское изделие, в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10.

Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного пациента. Повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых изделий содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств материала и нарушение стерильности, вызванное подобным повторным использованием, может привести к заболеванию

Упаковка

Тупфер с транспортной средой упакован в индивидуальную/ групповую / транспортную упаковку:

Транспортная среда	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
Amies (Amies с углем)	50 шт	600 шт
Cary-Blair	50 шт	600 шт

Тупфер без транспортной среды упакован групповую / транспортную упаковку:

Транспортная среда	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
Без транспортной среды	100 шт	1800 шт

Условия хранения

Изделия следует хранить в сухих, проветриваемых помещениях с темным освещением при температуре от + 4 до + 25°С, и относительной влажности не более 80%.

Условия транспортировки

Тупферы транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта при температуре от +4 до 25°С.

Срок годности

- Срок годности тупферов с транспортной средой – 18 месяцев с даты изготовления (при условии соблюдения условий хранения).
- Срок годности тупферов без транспортной среды – 24 месяца с даты изготовления (при условии соблюдения условий хранения).

Порядок осуществления утилизации и уничтожения

Использованные тупферы должны быть утилизированы согласно санитарно-эпидемиологических требований к обращению с медицинскими отходами СанПин 2.1.7.2790-10 в зависимости от типа биологического загрязнения.