

Технический паспорт медицинского изделия

Перчатки медицинские Armilla нестерильные
Перчатки диагностические Armilla нитриловые нестерильные
неопудренные



Изготовитель: Yixing HBM Latex Production Co., Ltd.

Адрес: Dingshu Town, 214225 Yixing, China

1. Сведения о медицинском изделии

Перчатки диагностические Armilla нитриловые нестерильные неопудренные

Изготовитель: «Исин Эйч Би Эм Латекс Продакшн Ко. Лтд» / «Yixing HBM Latex Production Co., Ltd.»

Адрес: Dingshu Town, 214225 Yixing, China

2. Описание

Перчатки диагностические Armilla нитриловые нестерильные неопудренные используются при оказании медицинской помощи, чтобы предотвратить загрязнение рук медицинского работника и защитить их от микробов пациента. Перчатки обладают исключительной прочностью и легко приспосабливаются к форме руки.

3. Технические характеристики

3.1. Материал изготовления

Перчатки изготовлены из гипоаллергенного синтетического каучука (бутадиен-нитрильный каучук).

3.2. Особенности медицинского изделия

Основные преимущества использования нитриловых перчаток:

- Повышенная устойчивость к проколам и порезам;
- Гипоаллергенность;
- Высокая герметичность;
- Защита от обычной патогенной микрофлоры и от агрессивной химической среды;
- Нитриловые перчатки, при надевании, соответствуют форме вашей руки ("вторая кожа"), что делает их аккуратными и удобными;
- Благодаря более плотному прилеганию - эффект "второй кожи" - нитрил лучше противостоит попаданию на кожу воды и других жидкостей;

3.3. Физико-химические свойства

Конструкция: Перчатки пятипалые, бесшовные. Манжета закатана в венчик;

Обработка поверхности: Полимерное покрытие, неопудренные;

Отделка поверхности: Текстурированные на пальцах

Цвет: Голубой

Размерность перчаток представлена в **Таблице 1**.

Таблица 1 – Размерность перчаток диагностических Armilla нитриловые нестерильные неопудренные.

Размер	S (6,5)	M (7-7,5)	L (8-8,5)	XL (9-9,5)
Длина (мм)	240±10	240±10	240±10	240±10
Толщина (мм)				
Пальца	0.12±0.05	0.12±0.05	0.12±0.05	0.12±0.05
Ладони	0.08±0.03	0.08±0.03	0.08±0.03	0.08±0.03
- Манжеты	0.07±0.03	0.07±0.03	0.07±0.03	0.07±0.03
Прочность на растяжение (МПа)				
До ускоренного старения	14	14	14	14
После ускоренного старения	14	14	14	14
Удлинение при разрыве (%)				
До ускоренного старения	500	500	500	500
После ускоренного старения	400	400	400	400

4. Фотографическое изображение медицинского изделия



5. Фотографическое изображение групповой упаковки медицинского изделия



6. Условия хранения медицинского изделия

Хранить в сухом прохладном месте. Не храните нитриловые перчатки там, где температура может подняться выше 40°C.

7. Меры предосторожности

- Не используйте изделие по истечению срока годности;
- Не используйте изделие не по назначению;
- Не используйте изделие повторно;
- Не используйте изделие, если внутри них присутствует постороннее вещество;

Использованное медицинское изделие необходимо утилизировать в соответствии с санитарными правилами и нормами **СанПиН 2.1.3684-21**.

8. Упаковка

Групповая упаковка (диспенсер)	Транспортная упаковка
100 штук (50 пар)	1000 штук (500 пар)

9. Срок годности

Гарантийный срок хранения перчаток – 5 лет с даты изготовления.

10. Регистрационное удостоверение

Регистрационное удостоверение №РЗН 2013/1221 от 18.09.2019 года на медицинское изделие «Перчатки медицинские Armilla нестерильные».

11. Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Инфора»

Адрес: 690002, г.Владивосток, Проспект Острякова д.8, кв.29, тел.: +7 (914) 703-51-93,
e-mail: infora125@mail.ru.