

Инструкция по использованию медицинского изделия

Одежда медицинская одноразовая из нетканого материала: Шапочка «Берет»/ Шапочка «Шарлотта» / Шапочка «Колпак»



Шапочки предназначены для соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований при проведении различного рода процедур.

Порядок (алгоритм) использования по назначению (применения)

1. Тщательно вымойте руки с мылом;
2. Вскройте упаковку;
3. Выньте шапочку из упаковки;
4. Наденьте на голову шапочку, убрав под неё все волосы на голове и шее;
5. Заменять шапочку следует по необходимости, в зависимости от загрязнения или повреждений во время работы.



В медицинских организациях использованные шапочки подлежат обеззараживанию и удалению, как отходы класса Б или В.

В домашних условиях использованные шапочки утилизируют вместе с бытовым мусором.

Меры предосторожности

- Не используйте поврежденное изделие;
- Не используйте изделие, если упаковка открыта или повреждена;
- Не используйте изделие по истечению срока годности;
- Не используйте изделие не по назначению;
- Не используйте изделие повторно;

Условия хранения и транспортировки

Хранение шапочек производится в упаковке предприятия изготовителя в сухом прохладном месте.

Гарантия изготовителя

Гарантийный срок хранения шапочек – 6 лет с даты изготовления.

Документ, подтверждающий регистрацию МИ

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10740 от 29.09.2011 года на медицинское изделие: «Одежда медицинская одноразовая из нетканого и полимерного материалов: 1. Халат. 2. Комбинезон. 3. Фартук. 4. Маска. 5. Бахилы. 6. Шапочка. 7. Нарукавники. 8. Брюки.».

Производитель:

«Хубэй Сяньмэн Хелс Протекшн Коммодити» / «Hubei Xianmeng Health Protection Commodity Co., LTD»

Адрес: 433000 Industrial 1st road, Chenchang town, Xiantao, Hubei province, P.R. China